

Respirátor KN95-FFP2

Návod na použitie

Funkcie:

Využíva sa na zakrytie a ochranu úst a nosa, môže účinne zabrániť vdýchnutiu prachu a kvapôčiek.

Využitie:

1. Namontujte masku bez spony na nos a spona na nose by mala byť na vrchu. Podľa obrázka na škatuli.
2. Držte masku na tvári a na brade
3. Potiahnite svorky na oboch stranách a zaveste na ušiach a upravte ich tak, aby ste sa cítili pohodlne;
4. Pomocou prstov pritlačte kovovú nosovú sponu a posúvajte prsty po oboch stranách, kým sa spona nosa úplne nestlačí do tvaru nosa;
5. Položte ruky na tvár, aby ste skontrolovali či maska sedí na vašej tvári.

Informácie o produkte:

Názov produktu: Ochranná maska

Vlastnosti a zloženie produktu: Tento produkt je laminovaný z viacerých vrstiev tenkej látky

Veľkosť: pre dospelého človeka

Štandard: GB 2626-2006

Dátum výroby: Pozrite na certifikáte vo vnútri

Platnosť: 3 roky

Balenie: 20ks

Skladovanie: Uskladnite vo vetranom, suchom, hygienickom a nekorozívnom mieste

Upozornenie: U pacientov s problémami s dýchaním alebo vrodeným ochorením srdca sa neodporúča používať.

Tento produkt sa nemôže používať ako plynová maska v toxickom prostredí.